



поставщик лабораторий

**МиниМед®**

241520, г. Брянск, Супонеево, ул. Шоссейная, 17а Тел./факс (4832) 92-24-54, тел. 92-24-52, 92-24-57

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ «МАСЛО ИММЕРСИОННОЕ»

### 1. Назначение.

Масло иммерсионное предназначено для использования в качестве вспомогательного компонента для микроскопических методов исследования в клинико-диагностических лабораториях.

### 2. Состав.

- 1) Масло иммерсионное, флакон 100 мл
- 2) Инструкция по применению.

### 3. Меры предосторожности.

При работе с набором необходимо соблюдать «Правила устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противозидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР» (Москва, 1981 г.).

Утилизация набора с истекшим сроком хранения, не требует специальных мер безопасности.

### 4. Способ применения.

Отвинтить крышку флакона и нанести необходимое количество иммерсионного масла (1-2 капли) на препарат. Подготовку и проведение исследования осуществлять в соответствии с руководством по эксплуатации микроскопа.

Иммерсионное масло рекомендуется удалять с поверхности препарата при помощи салфетки, смоченной о-ксилолом, этиловым или изопропиловым спиртом. Очистку иммерсионных объективов после использования осуществлять в соответствии с руководством по эксплуатации микроскопа.

### 5. Условия хранения и эксплуатации.

Набор реагентов «Масло иммерсионное» должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности воздуха не более 80% в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, отопительных установок, атмосферных осадков и агрессивных сред.

Срок годности реагента – 1,5 года с даты изготовления.

*По вопросам, касающимся приобретения и качества изделия, просим обращаться по адресу: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонеево, ул. Шоссейная, 17а. Тел./факс (4832) 92-24-52.*