


УТВЕРЖДЕНА

Приказом Росздравнадзора
От 14.05.2013 № 1233-Пр/13

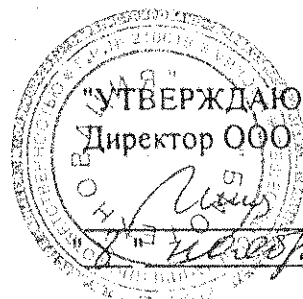

А.В.Пискунова
14 мая 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
"ИПС-Биотехновация"
Питательные среды микробиологические, сухие

Комплект №15. Маннит-солевой агар. Среда № 10 для выделения и идентификации стафилококков, сухая

Регистрационное удостоверение № РЗН.2013/699 от 14 мая 2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор, представляющий собой сухие питательные среды, предназначенные для приготовления жидких и плотных питательных сред, используемых при проведении микробиологических исследований.

2. СОСТАВ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Представляет собой мелкодисперсный гомогенный, гигроскопичный, светочувствительный порошок светло-бежевого цвета.

Состав (в пересчете на 1 л готовой среды):

Пептон ферментативный, сухой	- 9,7 г.
Д(-) маннит	- 9,7 г.
Натрий хлористый	- 75,1 г.
Агар микробиологический	- 15,0 г.
Экстракт автолизированных дрожжей осветленный	- 1,1 г.
Натрий углекислый	+ 0,4 г.
Феноловый красный водорастворимый	- 0,02 г.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ГОТОВОЙ СРЕДЫ, ЕЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Плотная питательная среда для идентификации клинически значимых культур стафилококков.

111 г сухой среды развести в 1 л воды очищенной, довести до кипения, кипятить 1-3 мин до полного растворения. Стерилизовать в течение 20 мин при температуре 112°C. После охлаждения среды до 48 °C разлить в стерильные чашки Петри. После застывания среды чашки подсушить в течение 35-45 мин при температуре 37°C.

Готовая среда должна быть прозрачной, красно-оранжевого цвета.

Готовую среду до использования можно хранить в темном месте не более 7 сут при температуре 2-8 °C.

Посевы исследуемых образцов инкубировать 18-24 ч при температуре 37 °C.

S. aureus образует желтые колонии, *S. epidermidis* - красные колонии.

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. Потенциальный риск применения набора – класс I (Приказ МЗ РФ № 4н от 06.06.2012 г.)

4.2. Меры предосторожности при использовании по назначению готовых питательных сред – соблюдение требований СП 1.3.2322-08 Безопасность работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и гельминтами и возбудителями паразитарных инфекций.

4.3. Утилизация сухих сред с истекшим сроком хранения и использованных готовых питательных сред – в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.728-99 Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

5. СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности сухих сред – 2 года. Среды с истекшим сроком годности применению не подлежат.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение

В упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 °С до 25 °С. Замораживание не допускается.

Транспортирование

При температуре от 2 °С до 25 °С. Замораживание не допускается.

7. УСЛОВИЯ ОТПУСКА

Для учреждений здравоохранения.

По вопросам, касающимся качества набора реагентов, следует обращаться на предприятие изготовитель по адресу: Россия, 142530, МО, г. Электрогорск ул. Свердлова, д.11, отдел сбыта (499) 390-05-63, e-mail: biotechnov@yandex.ru

Технолог ООО «БИОТЕХНОВАЦИЯ»

В.В.Власенко

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой клинической лабораторной
диагностики ГБОУ ДПО РМАПО

Минздравсоцразвития России д.м.н., профессор

8 ноября 2012 г.

В.В.Долгов

